

## Компрессионные технологии medi



**medi compression** – знак качества, олицетворяющий инновационную и высокотехнологичную продукцию компании medi для хорошего самочувствия в повседневной жизни, медицине и спорте.



Clima Comfort

**Clima Comfort** – запатентованная технология вязки из уникальных дышащих материалов, обеспечивающая оптимальный водный и температурный балансы кожи в любое время года.



Clima Fresh

Запатентованная технология **Clima Fresh** обеспечивает антибактериальный эффект и препятствует образованию неприятного запаха.

### Подбор размера

#### Измерения для подбора размера гольфов:

1 – длина окружности голени над лодыжками

A – длина ноги от стопы до уровня на два пальца ниже подколенной складки


#### Измерения для подбора размера чулок и колготок:

1 – длина окружности голени над лодыжками

2 – длина окружности верхней трети бедра на 5 см ниже промежности

B – длина ноги от стопы до измерения 2

Область стопы: универсальная для размеров 36-43

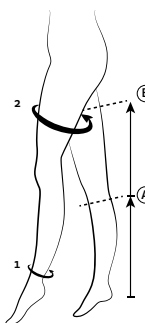

	S	M	L	L+
Длина окружности 1, см	18 – 20	20 – 23	23 – 26	26 – 29
Длина окружности 2, см	46 – 54	52 – 62	56 – 66	

Длина	Для гольфов	Для чулок и колготок
L1, см	< 38	< 72
L2, см	> 38	> 72

## Функциональность, эстетика и комфорт

Новая коллекция **mJ-1** — это компрессионный трикотаж с физиологическим распределением давления для здоровых людей.

Почему именно **mJ-1**?

Если Вы заботитесь о своем здоровье, то ответ очевиден:

**mJ-1** — это гармоничное сочетание функциональности, привлекательного внешнего вида и комфорта при использовании;

**mJ-1** — это более современная и эффективная альтернатива обычному поддерживающему профилактическому трикотажу с давлением ниже 1-го класса компрессии (ниже 18 мм рт. ст.);

**mJ-1** — это отличное настроение, хорошее самочувствие, здоровье и красота Ваших ног.

medi RUS

МОСКВА  
(495) 921-39-37  
info@medirus.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
(812) 607-61-41  
spb@medirus.ru

НОВОСИБИРСК  
(383) 207-91-41  
novosibirsk@medirus.ru

www.medirus.ru

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 8-800-250-39-37

900907/02.19/2000

medi



**mJ-1**

Компрессионный трикотаж для современной жизни

Инструкция по использованию



## Рекомендации по использованию


---

### Назначение

Компрессионный трикотаж для современной жизни предназначен для профилактики «синдрома тяжелых ног», варикозного расширения вен, для поддержания хорошего самочувствия.

### Рекомендации по надеванию

- Надевайте компрессионный трикотаж утром, после пробуждения и гигиенических процедур.
- Выверните изделие наизнанку до той части, которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. Обратите внимание на правильное положение пятки.
- Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге.
- Если Вы чрезмерно растянули изделие вверх, то опустите его вниз до уровня лодыжек и затем снова расправьте, не растягивая сильно.

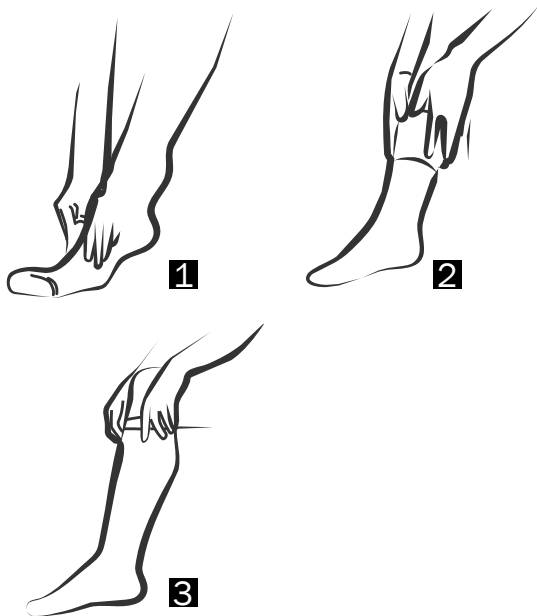

### Особые указания

- Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это приводит к локальному повышению давления (так называемому «эффекту жгута»), ухудшению кровотока и неприятным ощущениям.
- Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца на руках.
- Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки.
- Натягивая изделие вверх, следите за тем, чтобы не образовывались морщины и складки.
- Шершавая и ороговевшая кожа на пятках часто является причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка должна скользить через узкую часть изделия.
- Пожалуйста, обращайте внимание на состояние Вашей обуви. Внутренняя поверхность обуви должна поддерживаться в безукоризненном состоянии. Дефекты обуви или стельки могут привести к повреждению изделия.
- Если при несоответствующем обращении с трикотажем вытянулись петли или выступили нитки, их не следует обрезать, иначе появятся спустившиеся петли и возникнут дырки.
- Компрессионный трикотаж устойчив к различным мазям, кремам и увлажнителям кожи, однако некоторые их комбинации со временем могут привести к снижению прочности изделия. Также при использовании кремов, мазей и масел для тела возможно снижение фиксирующей способности резинки на силиконовой основе у чулок.

### Рекомендации по стирке

Первый раз стирайте Ваше компрессионное изделие отдельно от другого белья. Стирайте компрессионный трикотаж ежедневно (особенно при использовании косметических средств для ног) вручную (40 °С) или в стиральной машине в деликатном режиме. Кроме того, ежедневная стирка необходима для сохранения трикотажем компрессионных свойств. Стирая в стиральной машине, пользуйтесь специальной защитной сеточкой для стирки деликатных тканей. Применяйте специальные деликатные моющие средства для цветного белья, не содержащие отбеливатели и кондиционеры. После стирки многократно прополощите компрессионное изделие, аккуратно отожмите руками или в стиральной машине, используя деликатный режим, и повесьте сушиться в хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте влажные компрессионные изделия лежать на полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите компрессионный трикотаж на отопительной батарее, не гладьте утюгом, не подвергайте химической чистке.

### Рекомендации по хранению и информация о гарантийных периодах

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги. Дата изготовления: дата окончания гарантийного срока реализации минус 36 месяцев (дата окончания гарантийного срока реализации отмечена знаком песочных часов и цифрами «год/месяц» на наклейке на упаковке изготовителя). По истечении гарантийного срока реализации изделия могут быть использованы по назначению в течение 6 месяцев. Срок годности: 42 месяца от даты изготовления. По истечении срока годности (в связи с возможностью частичной потери компрессионных свойств) изделие подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.